

# InsuJet™

سیستم تزریق انسولین بدون سوزن InsuJet™

## دستورالعمل های

## استفاده از حلقه راحتی InsuJet™

- لطفاً قبل از استفاده از سیستم InsuJet جزوه استفاده از آن که در بسته InsuJet موجود است را به طور کامل مطالعه کنید.
- دستورالعمل اصلی استفاده از InsuJet را در محلی امن نگهداری کنید.

• برای یک تزریق راحت • سازگار با نازل InsuJet™ • حداکثر استفاده: 56 بار یا 14 روز (هر کدام زودتر انجام شود).	حلقه راحتی InsuJet™
---	------------------------

## افسانه نماد(؟)

دستگاه پزشکی



طبق دستورالعمل استفاده کنید.



احتیاط



تولید کننده



محدودیت های دما



شماره کاتالوگ



سریال ساخت



European Pharma Group BV


Euro Offices Building 3rd Floor  
Beechavenue 127, 1119 RB Schiphol-Rijk,  
The Netherlands



017403-FA-1.0 (FA)

8 ژوئن 2022

[www.insujet.com](http://www.insujet.com) | [info@insujet.com](mailto:info@insujet.com)

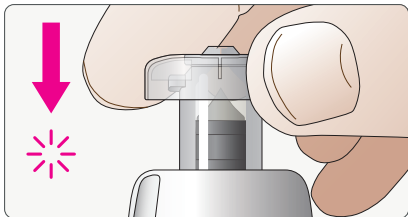


### هشدارها و اقدامات احتیاطی

- حلقه راحتی را هر بار که نازل اینسوجت را تعویض می کنید، هر 14 روز یا هر 56 تزریق، هر کدام زودتر موعده رسید، تعویض کنید.
- هنگام نصب حلقه راحتی مراقب باشید که نوک نازل را لمس نکنید.
- یادداشت ها
- با زباله های معمولی خانگی دور بیندازید
- محدودیت های دما در استفاده



P/N: 01223

(استریل نیست)

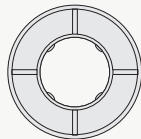

حلقه راحتی جز لوازم جانبی InsuJet است. در صورت احساس ناراحتی هنگام فشار دادن نازل به پوست، استفاده از حلقه راحتی توصیه می شود.

برای نصب حلقه راحتی، دستگاه را از سمت جلوی آن نگه دارید و حلقه راحتی را در بالای نازل قرار دهید. مطمئن شوید که قسمت گرد حلقه راحتی رو به بیرون باشد. حلقه راحتی را در بالای نازل فشار دهید تا در جای خود محکم شود.